

# KOPPLUNG DER KABELLOSEN FUSSSCHALTER MIT DER STEUERBOX

## 1. BATTERIEFACH ÖFFNEN


Drehen Sie die kabellose Fußsteuerung um und öffnen Sie das Batteriefach. Möglicherweise ist die Abdeckung mit Schrauben befestigt.

## 2. BATTERIEN EINSETZEN

Legen Sie die Batterien entsprechend den Plus- und Minuszeichen ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien fest sitzen.

## 3. IN DER NÄHE DER STEUERBOX BLEIBEN

Halten Sie die Fußsteuerung in einem Abstand von maximal zwei Metern zur Steuerbox des Behandlungsliege.

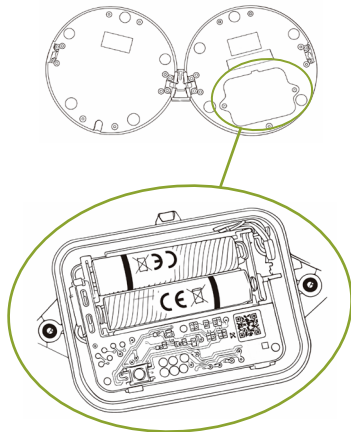

## 4. KOPPLUNGSMODUS AKTIVIEREN

Drücken Sie etwa drei Sekunden lang auf die Taste unter dem Fussteller. Sie hören einen Piepton und die Kontrollleuchte leuchtet auf. Der Kopplungsmodus ist nun aktiv.

## 5. FUSSBEDIENUNG ZUR STEUERBOX BRINGEN

Halten Sie die Fußsteuerung näher an die Steuerbox. Bringen Sie die Fernbedienung auf weniger als 10 cm an die Steuerbox heran. Der Piepton wechselt von langsam zu schnell.

## 6. KOPPLUNG BESTÄTIGEN

Drücken Sie erneut auf die Taste unter dem Fussteller, um die Kopplung zu bestätigen. Sie hören nun zwei kurze Pieptöne: Dies bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich war.