

KOPPELEN VAN DE DRAADLOZE VOETBEDIENING MET DE CONTROLEBOX

1. OPEN BATTERIJCOMPARTIMENT


Draai de draadloze voetbediening om en open het batterijcompartment. Het is mogelijk dat de afdekking met schroeven is bevestigd.

2. BATTERIJEN PLAATSEN

Plaats de batterijen volgens de plus- en mintekens. Let erop dat de batterijen stevig vastzitten.

3. GA IN DE BUURT VAN DE CONTROLEBOX STAAN

Houd de voetbediening op een afstand van maximaal twee meter van de controlebox van de behandelbank.

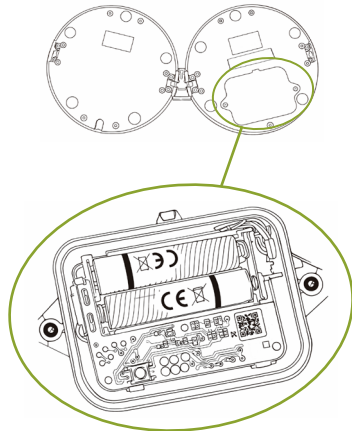

4. KOPPELINGSMODUS ACTIVEREN

Druk ongeveer drie seconden op de knop onder de voetbediening. Je hoort een pieptoon en het lampje gaat branden. De koppelingsmodus is nu actief.

5. CONTROLEBOX

Houd de voetbediening dicht bij de controlebox.
Breng de voetbediening tot minder dan 10 cm van de controlebox.
De pieptoon verandert van langzaam naar snel.

6. KOPPELING BEVESTIGEN

Druk opnieuw op de knop onder de voetbediening om de koppeling te bevestigen. Je hoort nu twee korte pieptonen: dit betekent dat de koppeling succesvol is.